


Használati Útmutató

Használat előtt olvassa el figyelmesen jelen tájékoztatót!

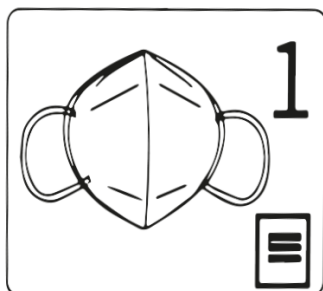

Kizárólag használat előtt vegye ki a tasakból. Helyezze fel úgy a maszkot, hogy az orr-rész felfelé álljon.



Győződjön meg arról, hogy az orr-rész eltakarja és átfogja az orrnyerget, valamint a maszk eltakarja az állát. Helyezze a fülpántokat a fülek köré.



Győződjön meg arról, hogy száját és az orrát teljesen lefedi a maszk. Formázza az orrcsipeszt úgy, hogy szorosan illeszkedjen az orrnyereg köré. Gondosan ügyeljen az arc körüli jó záródásra, hogy minimalizálja az alászívás lehetőségét. Ellenőrzéshez végezzen erőteljes kilégzést. Szükség esetén állítsa be újra az orrcsipeszt.



Használat után tegye a maszkot egy zacskóba és dobja ki a szemetesbe